

Termômetro para caixa de vacina

Para o melhor funcionamento e durabilidade do termômetro, sugerimos algumas precauções:

MANUSEIO:

O cabo extensor deve ser enrolado com cuidado, de forma que o rolo fique com no máximo três voltas e a saída do cabo junto a base posicionada para baixo. Este procedimento evitará dobras acentuadas no fio capilar, condutor do líquido, evitando a sua intercalação.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO:

Para prevenir o fracionamento da coluna, os termômetros devem ser transportados de pé e armazenados preferencialmente na mesma posição (vertical).

CONCERTO DA COLUNA DE LÍQUIDO:

Durante o transporte ou devido ao armazenamento inadequado, a coluna poderá fracionar. Para juntá-la, segure o instrumento na posição vertical e bata-o levemente contra a mão.

OBSERVAÇÃO:

No transporte de vacina, o termômetro não deve ser exposto ao sol. Temperaturas superiores a 40°C poderão causar danos ao instrumento ou tornar o líquido do termômetro transparente.

Referências Técnicas

Ref.: 5837.3

Dimensões	140x40mm
Escala	-25+30°C
Divisão	1°C
Limite de Erro	±2°C
Enchimento	Líquido



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

VALIDADE INDETERMINADA

Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br



INCOTERM[®]
INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS