

# massageador

corporal Comfort



Massageador portátil.

O conforto

ao seu alcance!

 **Incoterm**<sup>®</sup>  
Soluções em medição

# MASSAGEADOR COMFORT - Ref.: M-737

Parabéns pela escolha do Massageador COMFORT portátil da Incoterm.  
Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir.  
Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

## INTRODUÇÃO

A rotina de trabalho, preocupação, trânsito e todos os outros males da vida moderna deixam o corpo tenso, sendo difícil relaxar e descansar depois de um dia difícil, mesmo após chegar em casa.

Apresentamos o novo massageador COMFORT para melhorar seu bem-estar, você vai sentir-se mais tranquilo, com mais energia e vitalidade.

O COMFORT é o massageador portátil que você precisa para relaxar e aliviar as tensões dos músculos cansados, garantindo uma sensação agradável e relaxante por todo seu corpo.

Versátil, ele pode ser utilizado com um dos três cabeçotes para massagear o corpo de maneira completa ou ainda pontos específicos, seu design permite massagear costas, nuca, pernas, pés e braços.

Com o COMFORT você vai relaxar!

## MODO DE FUNCIONAMENTO (OPERAÇÃO)

- Antes da primeira utilização desenrosque a tampa das pilhas na parte superior do instrumento e insira 3 pilhas tipo AAA.
- Garanta que a tampa está firmemente apertada após fechar.
- Para começar a usar no corpo, aplique uma leve pressão na parte superior do massageador para começar a vibração.
- Para parar a vibração pare de pressionar o massageador.

## ATENÇÃO

Mantenha o massageador longe de fontes de calor.

Para limpar o massageador, utilize um pano macio levemente umedecido com água.

Utilize o massageador com cuidado. Retire as pilhas quando o massageador estiver fora de uso por longos períodos.

**Importante: não utilize o massageador na mesma área do corpo por mais de 5 minutos.**

Não ultrapasse o limite de 20 minutos a cada uso.

## MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



**Nota: Ajude a preservar o meio-ambiente, coloque pilhas usadas no depósito correto.**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Temperatura de uso:** 18°C a 60°C

**Alimentação:** 3 pilhas de 1,5V tipo AAA

**Dimensões:** 120 x 95 mm

**Peso:** 145g

**Durabilidade das pilhas:** média de 30 minutos de uso contínuo

**Este produto não é à prova d'água.**



Faça parte das nossas redes sociais



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



**Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br  
www.incoterm.com.br



Origem: China