



Agrotemp

Termômetro para Descongelamento de Sêmen

Parabéns por ter adquirido um produto com a qualidade Incoterm. Instrumento de grande precisão e qualidade comprovada pelos processos internos de verificação.

Para o processo de descongelamento de sêmen realizado em água, a temperatura ideal fica entre 35°C e 37°C. Quando o sêmen é descongelado em temperaturas inferiores a esta, o tempo de descongelamento é maior, permitindo nova organização de cristais de gelo, o que provoca danos em várias partes dos espermatozoides. Na temperatura entre 35°C e 37°C a velocidade de descongelamento é rápida o bastante para evitar a reorganização desses cristais, o que promove a sobrevivência de um maior número de espermatozoides viáveis, proporcionando assim maior poder da dose inseminante que foi descongelada.

Suas principais características são garantia de qualidade, funcionalidade e a exatidão do instrumento.

Termômetro de Cristal Líquido

- O termômetro de cristal líquido não quebra, não é tóxico, apresenta leitura com estabilização rápida e longa vida útil;
- Conforme ocorre a mudança de temperatura, o termômetro de cristal líquido mostra cores diferentes.
- Verde indica a leitura correta, se estiver azul e/ou laranja deve-se somar as duas leituras e em seguida dividir por dois;
- Evite expor o termômetro ao sol;

Dados Técnicos

Faixa de medição/uso: 32°C à 40°C

Resolução:

32°C a 35°C: 1°C/2°F

35°C a 37°C: 2°C/2°F

37°C a 40°C: 1°C/2°F

Exatidão: $\pm 1^\circ\text{C}$

Temp. de armazenamento/transporte: 0°C a 40°C

Dimensões do termômetro: 0,75x60x127mm



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

VALIDADE INDETERMINADA

Resp. Técnico: Cláudio Frank Pereira da Cunha / CRQ: 05300170

PRODUTO NÃO ESTERILIZÁVEL



Fabricado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br