



Manual de Instruções

Instruções de operação para IPHONE/IPOD



MODELO I-0200.00

**Balança Bluetooth® Body
Scale para IPOD | IPAD E IPHONE**

www.
incoterm
.com.br

Instruções de operação para iPhone/iPod

Balança Bluetooth® Body Scale



• Ir para a página de alimentos

• Ir para a página de usuário

• Ir para a página de configuração

• Ir para a página de atividade

• Ir para a página registros

• Ir para a página de introdução

• Ir para a página minhas FAQ (perguntas e respostas frequentes)

• Ir para a página de plano

• Ir para a página de histórico



- Tocar para ir para a página de gráfico de histórico
- Tocar para exibir 4 semanas
- Tocar para exibir 2 semanas
- Tocar para exibir todos históricos



- Toçar para exibir a página de lista de históricos
- Toçar para exibir 4 semanas
- Toçar para exibir 2 semanas
- Toçar para exibir todos históricos
- Arraste o gráfico verticalmente pode exibir mais conteúdo



- Exibir o resultado do teste de peso atual
- Tocar para compartilhar
- Toque a margem e os detalhes do resultado de teste serão exibidos



36.2 kg(s)

Gordura Corporal: -- %

Ossos do Corpo: -- %

Água do Corpo: -- %

Músculos do Corpo: -- %

CCD: --

IMC 12.0




- Tocar para ir para a página principal


- Arrastar verticalmente o gráfico pode exibir os próximos dados ou os já vistos

- Arrastar longitudinalmente o gráfico pode exibir o próximo item pop-up ou o anterior

- Tocar para voltar para a página principal

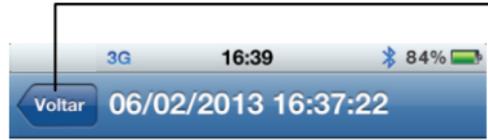

Alimento Actividade

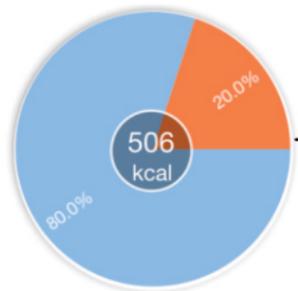


- Arrastar verticalmente o gráfico pode exibir os próximos dados ou os já vistos



- Arrastar longitudinalmente o gráfico pode exibir o próximo item pop-up ou o anterior



- Tocar para voltar para a página principal


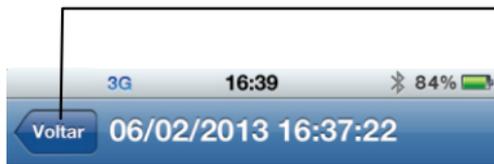


- Arrastar verticalmente o gráfico pode exibir os próximos dados ou os já vistos



- Arrastar longitudinalmente o gráfico pode exibir o próximo item pop-up ou o anterior

- Tocar para voltar para a página principal

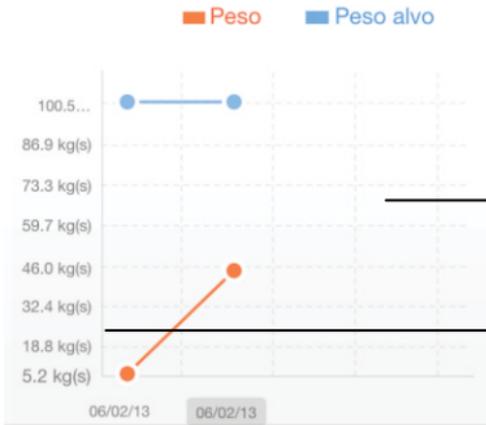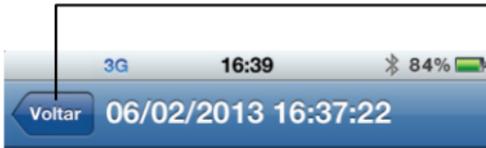

- Arrastar verticalmente o gráfico pode exibir os próximos dados ou os já vistos
- Arrastar longitudinalmente o gráfico pode exibir o próximo item pop-up ou o anterior





- Tocar para adicionar um novo plano
- Tocar para editar o plano
- Exibir o nome do plano



- Exibir os últimos dias
- Exibir o peso atual
- Exibir informações do plano
- Arrastar longitudinalmente o gráfico para baixo pode exibir a página de configuração de plano

Instruções de operação para iPhone/iPod

Balança Bluetooth® Body Scale



- Tocar para exibir a página do plano.

- Inserir as informações do plano

- Configurar a função alarme





- Tocar para exibir a página de lista de histórico

- Tocar para exibir 4 semanas

- Tocar para exibir 2 semanas

- Tocar para exibir todos históricos

- Arrastar verticalmente o gráfico pode exibir mais conteúdo

- Arrastar longitudinalmente o gráfico para baixo pode exibir um gráfico pizza de calorias e arrastar o gráfico para cima pode exibir o gráfico de peso



• Tocar para compartilhar

• Tocar para exibir 4 semanas

• Tocar para exibir 2 semanas


• Tocar para exibir todos históricos

• Arrastar o gráfico verticalmente pode exibir mais conteúdo



- Tocar para exibir a lista de alimentos de ontem
- Tocar para exibir a lista de alimentos do dia seguinte
- Exibir o número total de ingestão de calorias

- Tocar para ir para a página de adição de alimentos

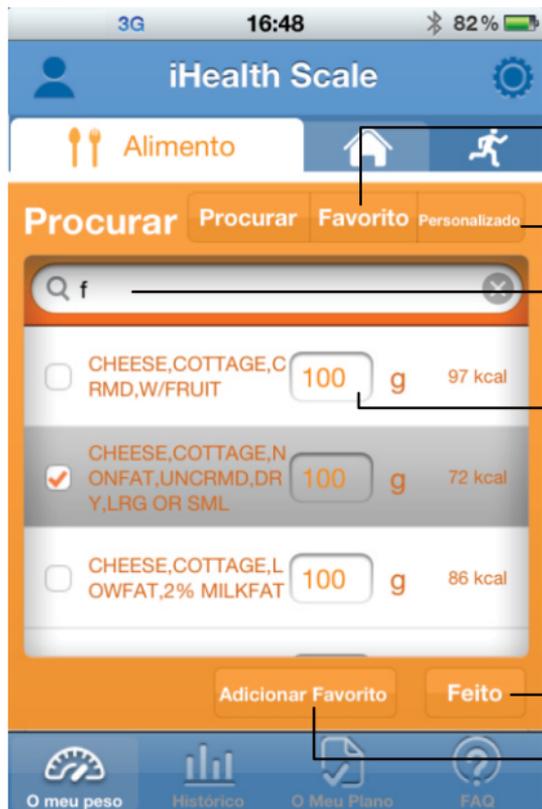

- Tocar para ir para a página de favoritos
- Tocar para ir para a página de alimentos personalizados
- Colocar o nome do alimento e procurá-lo
- Inserir o peso do alimento escolhido
- Tocar para adicionar o alimento selecionado à lista de alimentos
- Tocar para adicionar o alimento selecionado à lista de alimentos favoritos



- Inserir o nome do alimento personalizado
- Inserir as calorias do alimento personalizado
- Tocar para adicionar o alimento à lista de alimentos



- Inserir a lista de alimentos e procurá-la na lista de favoritos


- Inserir o peso do alimento escolhido

- Tocar para adicionar o alimento selecionado à lista de alimentos



- Tocar para exibir a lista de esportes de ontem
- Tocar para exibir a lista de esportes do dia seguinte
- Exibir o número total de consumo de calorias

- Tocar para ir para a página de adição de esportes

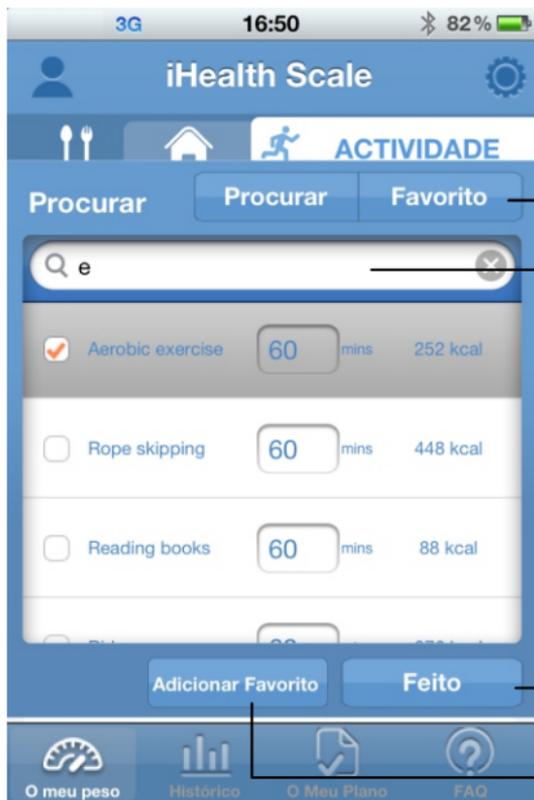

• Tocar para ir para a página de favoritos

• Inserir o nome do esporte e procurá-lo

• Tocar para adicionar o esporte selecionado à lista de esportes

• Tocar para adicionar o esporte selecionado à lista de esportes favoritos



- Tocar para ir para a página de busca de esportes

- Inserir o tempo do esporte escolhido

- Tocar para adicionar o esporte escolhido à lista de esportes



- Salvar as informações

- Inserir dados de peso


- Alterar a data

- Tocar para voltar à página principal



- Tocar para editar usuários
- Tocar para ir para informações detalhadas do usuário
- Tocar para ir para a página de adição de novo usuário



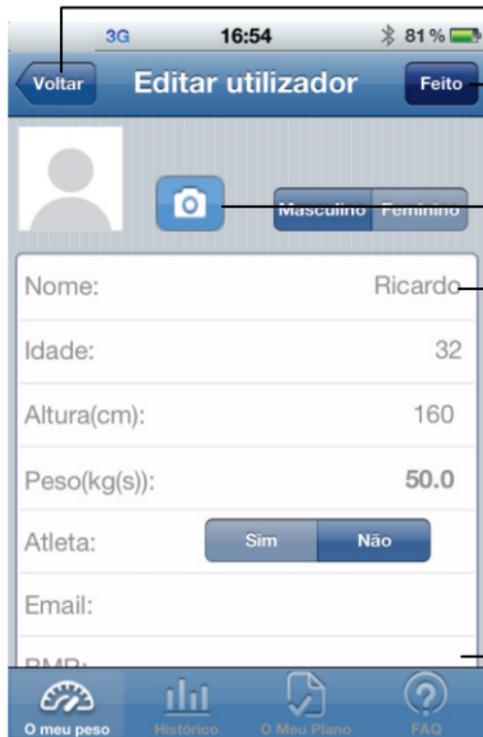

- Tocar para voltar para a página de lista de usuários
- Tocar para salvar as informações
- Tocar para modificar a foto do usuário
- Inserir as informações do usuário



- Recomendar para amigo

- Adicionar iHealthCloud



- Tocar para configurar a unidade de peso
- Tocar para ler os Direitos Autorais
- Tocar para ler os regulamentos
- Tocar para ler sobre nós
- Tocar para ir para a página de configuração da balança



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida por 01(um) ano, a partir da data de compra do produto e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br



Origem: EUA

Rev 001_07/2012_MKT/PED