



www.
incoterm
.com.br

Manual de Instruções



Termômetro Digital Veterinário

MODELO 6900.02

Termômetro Digital Veterinário

Parabéns por ter adquirido um produto da qualidade INCOTERM. O termômetro digital veterinário é um produto de grande precisão e qualidade comprovada. Para seu uso com completa confiança e eficácia, por favor leia com atenção este manual de instruções antes mesmo de usá-lo pela 1ª vez, guardando-o em local adequado para que possa ser consultado sempre que necessário.

Características

- *Medição da temperatura em aproximadamente 30 segundos
- *Beep de indicação
- *Visor em LCD
- *Temperatura em °C ou °F
- *Fácil manuseio
- *Confiável e seguro
- *Ideal para medir a temperatura de vários tipos de animais, como cães, gatos, suínos, bovinos entre outros.

Instruções de uso:

Operação

1. Ligue o termômetro pressionando o botão (fig.01).
2. O termômetro emitirá um “beep” e então realizará um teste automático, para verificar que todos os segmentos do visor estão preenchidos (fig.:02). Após isto aparecerão no visor “Lo” e °C ou °F piscando (o que estiver selecionado) (fig.: 03).
3. A tomada da temperatura dura aproximadamente 30 segundos.
4. O termômetro se desligará após aproximadamente 2 minutos (recomenda-se desligá-lo após o uso).

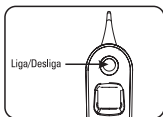


Fig.: 01



Fig.: 02



Fig.: 03

Obs.: Esse termômetro possui função memória, registrando a última medição efetuada, esta será mostrada logo que o termômetro for ligado.

Selecionando a unidade de medição

O visor indica a temperatura em °C ou °F. Para selecionar a unidade desejada desligue o aparelho e ligue novamente, pressionando o botão e mantendo-o pressionado até aparecer a unidade de medição. Assim que aparecer a unidade de medição, solte-o para completar a seleção.

Esterilização


Utilize álcool hidratado farmacêutico (etílico 95%). Mergulhe a ponteira (sensor) por um instante e seque. Pode-se utilizar um pano umedecido. Qualquer outro produto químico pode danificar o instrumento. Não utilize este produto em água fervente.

Cuidados

Evite submeter o termômetro a quedas ou impactos. Não o exponha ao sol ou a temperaturas elevadas. Não abra o compartimento da pilha, exceto no momento da troca. Não deixe este termômetro ao alcance de crianças, pois contém peças pequenas.

Troca de pilha

A pilha deve ser substituída quando aparecer no visor o desenho de uma pequena pilha. Deslize a tampa do compartimento de pilhas cuidadosamente, para baixo e a levante para substituir as pilhas.

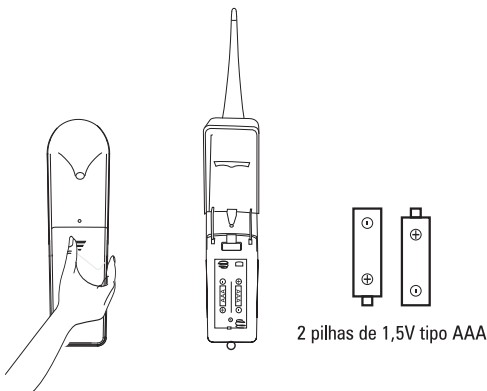

2 pilhas de 1,5V tipo AAA

Especificações Técnicas

Dimensões	190x110x35 mm
Peso bruto	195g
Peso líquido	55g
Material	Plástico

Temperatura

Faixa de medição	32,00 ~ 44,00°C (89,6 ~ 111,2°F)
Precisão entre 35,00°C a 39,00°C	±0,1°C
Precisão entre 95°F a 102,20°F	±0,2°F
Precisão abaixo de 35,00°C e acima de 39,00°C	±0,2°C
Precisão abaixo de 95°F a 102,20°F	±0,4°F
Resolução	0,01°C/°F
Alimentação:	2 pilhas de 1,5V tipo AAA
Vida útil da pilha	aprox. 500 horas ou 5000 medições



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br



Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106
atendimento@incoterm.com.br