

# Incoterm ecológico



## Sem Mercúrio

Parabéns por ter adquirido um produto com a qualidade Incoterm. O termômetro clínico Ecológico é um produto de grande precisão e qualidade comprovada. Para seu uso com completa confiança e eficácia, por favor, leia com atenção este manual de instruções antes mesmo de usá-lo pela primeira vez, guardando-o em local adequado para que possa ser consultado sempre que necessário.

### Instruções de uso:

Termômetro de líquido (ecológico) em vidro destinado a medir a temperatura do corpo humano. Antes de iniciar a medição é necessário verificar se a coluna de líquido se encontra abaixo de 35°C, quando não, segure o termômetro firmemente pela parte superior, (contrária ao bulbo - observe desenho) e flexione o antebraço repetidamente este processo deverá ser repetido por várias vezes. Evite segurar o termômetro pelo bulbo pois isto pode alterar a medição da temperatura.


**Em crianças, acompanhe a medição da temperatura.**

**As medições podem ser feitas das seguintes maneiras:**

### Forma de medições:

© **VIA ORAL:** Coloque a parte inferior do termômetro (bulbo) na boca, sob a língua, o tempo de medição não deve ser inferior a 4 minutos para evitar erros de medição. Mantenha a respiração pelas narinas. Não recomendamos mastigar, falar ou brincar quando estiver com o termômetro de baixo da língua. **Não realizar essa forma de medição em crianças menores de 6 anos.**

© **VIA AXILAS:** Coloque a parte inferior (bulbo) do termômetro no centro da axila, o tempo de medição não deve ser inferior a 4 minutos para evitar erros de medição. Mantenha o braço na posição normal ou cruze os braços sobre o peito segurando o instrumento firmemente.

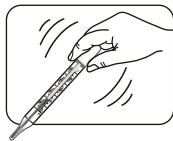

#### IMPORTANTE

Para sacudir o termômetro segure-o na parte superior  
Contrária ao bulbo

## Esterilização:

Utilize álcool hidratado farmacêutico (etílico 95%). Mergulhe a ponteira (bulbo) por alguns instantes e seque-a. Pode-se utilizar um pano umedecido. Qualquer outro produto químico pode danificar o instrumento. Não coloque este produto em água fervente.

**Recomendamos guardar o termômetro no estojo, com a indicação de temperatura marcando menos de 35°C.**

## Precauções:

Para manter o termômetro em perfeitas condições de uso, o instrumento não pode ser submetido a quedas ou impactos. Após sua utilização esterilize-o com álcool e guarde-o dentro do estojo, fora do alcance de crianças e em local sem exposição solar. Em caso de quebra, junte o líquido e coloque-o em um vidro fechado. Se ingerido procure um médico. Após a remoção do líquido metálico, trate a superfícies manchadas com uma lavagem composta de partes iguais de hidróxido de cálcio e enxofre em pó, misturada com água para formar uma pasta fina (poderá ser adquirido em agropecuária e casa de produtos químicos). Aplique essa pasta em todas as superfícies manchadas e deixe secar. Após 24h, remova a pasta e lave a superfície com água limpa.

## Dados técnicos:

**Faixa de medição/uso:** 35°C a 42°C

**Precisão:** 0,1°C

**Dimensões aprox.:** 126x9x12mm

**Peso:** 20g

**Temperatura de armazenamento e transporte:** 0°C a 45°C

**Registro Anvisa:** 10343200017

**Portaria Inmetro:** n° 52 de 05/03/2008

### VALIDADE INDETERMINADA

**Em crianças, acompanhe a medição da temperatura. Mantenha este instrumento em local seguro e longe do alcance de crianças.**

Resp. Téc.: Diego Zandona Nardin - CRQ: 05202514



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Importado por: **Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



**Incoterm**  
(51) 3245.7141  
3245.7106

**C · A · C**

[atendimento@incoterm.com.br](mailto:atendimento@incoterm.com.br)