

AO PERSISTIREM
OS SINTOMAS
DE TEMPERATURA
ELEVADA PROCURE
SEU MÉDICO

Termômetro Clínico Digital Termo Med 1.0

CARACTERÍSTICAS

Modelo: O termômetro de temperatura máxima à prova de água da Incoterm é um produto destinado a verificação da temperatura do corpo humano. A unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal. Emite sinais sonoros (beeps) diferenciados, ao final de cada medição, para temperatura febril ou normal, desliga-se automaticamente após aproximadamente 10 minutos (recomenda-se desligar logo após o uso).

Não contém mercúrio ou substância tóxica e possui partes recicláveis. Ao ligar o termômetro, este realiza um teste automático. Verifique que todos os segmentos do visor fiquem preenchidos.

INSTRUÇÕES DE USO

Retire o termômetro do estojo e pressione o botão situado ao lado do visor. Aparecerá a letra "L" e a unidade "°C" piscando. Se a temperatura ambiente for maior que 32°C, esta será indicada no visor.

POSSÍVEIS MÉTODOS DE MEDIÇÃO DA TEMPERATURA

Medição via oral: Coloque o sensor de temperatura abaixo da língua e certifique-se de que esteja em total contato com a área térmica existente e o mantenha nesta posição até o instrumento emitir o sinal sonoro (beeps). Feche a boca e respire tranquilamente pelo nariz. A temperatura poderá ser verificada no visor quando o sinal sonoro (beeps) for emitido.

Medição via axilar: Limpe as axilas com uma toalha seca. Coloque o sensor sob a axila e certifique-se que esteja em total contato com a pele. Mantenha o braço para baixo, ou o cruze-o sobre o peito. O tempo de medição deve ser de 3 a 5 minutos independente do sinal sonoro (beeps).

Esterilizado: Utilize o álcool hidratado farmacêutico (etilico 95%). Mergulhe a ponteira (sensor), por um instante e seque. Pode-se utilizar um pano umedecido. Qualquer outro produto químico pode danificar o instrumento. Não coloque este produto em água fervente.

TROCA DE PILHA

A pilha utilizada pode ser encontrada em joalherias ou lojas de artigos eletrônicos. Deve ser substituída quando aparecer na direita do visor apenas o desenho de uma pequena pilha.

Retire a tampa do compartimento superior do termômetro e substitua a pilha.

Respeite a POLARIDADE da pilha!

OBS: Caso não ligue favor INVERTER a pilha.



A. Compartimento da pilha;
B. Botão ligar/desligar;
C. Visor LCD;
D. Sensor.

CUIDADOS

Evite submeter o termômetro a quedas ou impactos. Não o exponha ao sol ou a temperaturas elevadas. Não abra o compartimento de pilha, exceto no momento da troca. Não deixe este termômetro ao alcance das crianças, pois contém peças pequenas. Quando não utilizado, mantenha-o em seu estojo.

DADOS TÉCNICOS

Faixa de medição: 32°C a 42°;

Resolução: 0,1°C;

Erro máximo de Indicação: ±0,2°C

Temp. de armazen./Transp.: -20°C a 50°C

Função auto-desligamento: Após 10 min.

Alimentação: 01 pilha de 1,5 Volts

LR41, tipo botão

Vida útil de: 250h ou até 1.000 usos

Dimensões aprox.: 126 X 18,5 X 10mm

Peso: 9,6g

Instrumento à prova d'água.

NÃO CONTÉM MERCÚRIO.

PRODUTO NÃO ESTERILIZÁVEL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Se, após o término da medição (sinal sonoro ativo - temperatura calculada finalizada), permanecer por um determinado tempo com o termômetro na axila, poderá ocorrer que a temperatura seja acrescida de no máximo 0,2°C do valor finalizado. Não é necessário se preocupar! Esta temperatura acrescida é chamada de temperatura do equilíbrio térmico e está previsto na portaria do Inmetro, anexo D.3.1.

A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso de atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de compra e mediante apresentação da nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Diego Zandoni Nardin / CRQ/RS: 05202514

Portaria Inmetro nº: 140 de 31/05/2007

Declarado isento de registro na Anvisa/MS

Número de cadastro Anvisa: 10343209014

VALIDADE INDETERMINADA

Mantenha este instrumento em local seguro e longe do alcance de crianças.
O instrumento contém peças pequenas que podem ser ingeridas por crianças menores.



Desde 1973

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106
atendimento@incoterm.com.br