


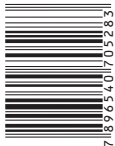

REF: 29833



Parabéns por ter adquirido um produto com qualidade INCOTERM. O TERMO FLEX JUMBO - termômetro clínico digital - é um produto de grande precisão e qualidade comprovada. Para seu uso com completa confiança e eficácia, por favor leia com atenção este manual de instruções antes mesmo de usá-lo pela 1ª vez, guardando-o em local adequado para que possa ser consultado sempre que necessário.

Características

Modelo: Termômetro Jumbo de temperatura máxima à prova d' água. Este produto é destinado a verificação da temperatura do corpo humano. A unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal. Emite sinais sonoros (beeps) diferenciados, ao final de uma medição, para temperatura febril ou normal.

Desliga-se automaticamente após aproximadamente 10 minutos (recomenda-se desligar logo após o uso).

A tomada de temperatura dura aproximadamente 1 minuto. Ecologicamente correto: não contém mercúrio ou substância tóxica. Partes recicláveis. Ao ligar o termômetro, este realiza um teste automático. Verifique que todos os segmentos do visor fiquem preenchidos.

Instruções de Uso

Retire o termômetro do estojo e pressione o botão situado na extremidade superior (vide figura A). Aparecerá a letra 'L' e a unidade '°C' piscando. Se a temperatura ambiente for maior que 32 °C, esta será indicada no visor.

Coloque o sensor sob a axila e certifique-se de que esteja em total contato com a pele.

Mantenha o braço para baixo, ou cruze-o sobre o peito. Quando a medição estiver completa o instrumento emitirá sinais sonoros (beeps) e a temperatura poderá ser verificada no visor. Os sinais sonoros são diferenciados para cada condição: (- de 37,5°C) um tipo de toque e (+ de 37,5°C) outro tipo de toque.

Esse termômetro possui função memória, registrando a última medição efetuada, esta é mostrada logo de início quando o termômetro é ligado (é indicada no visor com a inscrição "last memory").



FIGURA A

Esterilização

Utilize álcool hidratado farmacêutico (etílico 95%). Mergulhe a ponteira (sensor) por um instante e seque. Pode-se utilizar um pano umedecido. Qualquer outro produto químico pode danificar o instrumento. Não coloque este produto em água fervente.

Cuidados

Evite submeter o termômetro a quedas ou impactos. Não o exponha ao sol ou a temperaturas elevadas. Não abra o compartimento de bateria, exceto no momento da troca. Não deixe este termômetro ao alcance de crianças, pois contém peças pequenas. Quando não utilizado, mantenha-o em seu estojo.

Troca da Pilha

A pilha utilizada pode ser encontrada em joalherias ou lojas de artigos eletrônicos. Deve ser substituída quando aparecer na esquerda, abaixo do visor apenas o desenho de uma pequena pilha com um X. Retire a tampa do compartimento de pilha do termômetro e substitua a pilha (vide figura B).

Respeite a POLARIDADE da pilha!

Obs. Caso não ligue, favor INVERTER a pilha.



FIGURA B

Dados Técnicos

Faixa de medição/uso: 32°C a 42°C

Resolução: 0,1°C

Erro máximo de Indicação: ±0,2°C

Temperatura de armazenamento/transporte: -20°C a 50°C

Função auto-desligamento: Após 10 minutos

Alimentação: 01 pilha de 1,5 Volts LR1130, tipo botão

Vida útil: 250 h ou até 1.000 usos.

Dimensões aprox.: 134x34x15mm

Peso: 20g

Instrumento à prova d'água.

Informações complementares: Se, após o término da medição (sinal sonoro ativo – temperatura calculada finalizada), ficarmos por um determinado tempo, com o termômetro na axila, poderá ocorrer que a temperatura seja acrescida de no máximo 0,2°C do valor finalizado. Não é necessário se preocupar! Esta temperatura acrescida é chamada de temperatura do equilíbrio térmico e esta previsto na portaria do INMETRO anexo D.3.1.

PRODUTO NÃO PERECÍVEL

Em crianças, acompanhe a medição da temperatura. Mantenha este instrumento em local seguro e longe do alcance de crianças.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Portaria Inmetro nº 108 de 25/04/2008

ANVISA nº: 10343200016

Importado por:



INCOTERM
INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS



51 - 3245.7198
51 - 3245.7106

Matriz:
End.: Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS
CEP.: 91751-000 CNPJ 07.166.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax: 51 - 3248.1470
E-mails: vendas@incoterm.com.br
sac@incoterm.com.br

Filial:
End.: Rua Machado Bittencourt, 361 - sala
1505 - São Paulo/SP Tel.: 11 - 5574.5757

www.incoterm.com.br

Químico Responsável: Cláudio Frank Pereira da Cunha / CRQ: 05300170
Origem: Cotronic LTD / China