

FLEXTERM

Termômetro clínico digital de haste flexível

Cód. 29834



Características do Instrumento



Parabéns por ter adquirido um produto com a qualidade INCOTERM. O TERMOFLEX - termômetro clínico digital de haste flexível - é um produto de grande precisão e qualidade comprovada. Para seu uso com completa confiança e eficácia, por favor leia com atenção este manual de instruções antes mesmo de usá-lo pela 1ª vez, guardando-o em local adequado para que possa ser consultado sempre que necessário.

Características

Modelo: termômetro, de haste flexível, de temperatura máxima, à prova d' água. Este produto é destinado à verificação da temperatura do corpo humano. A unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão centesimal. Emite sinais sonoros (beeps) diferenciados, quando está pronto para o uso e ao final da tomada de temperatura. Desliga-se automaticamente após aproximadamente 10 minutos (recomenda-se desligar logo após o uso).

A tomada de temperatura dura aproximadamente 1 minuto. Ecologicamente correto: não contém mercúrio ou substância tóxica. Partes recicláveis. Ao ligar o termômetro, este realiza um teste automático. Verifique se todos os segmentos do visor ficam preenchidos.

Instruções de Uso

Retire o termômetro do estojo e pressione o botão situado ao lado do visor. Aparecerá a letra 'L' e a unidade '°C' piscando. Se a temperatura ambiente for maior que 32 °C, esta será indicada no visor.

Coloque o sensor sob a axila e certifique-se de que esteja em total contato com a pele. Mantenha o braço para baixo, ou cruze-o sobre o peito. Quando a medição estiver completa o instrumento emitirá sinais sonoros (beeps) e a temperatura poderá ser verificada no visor. Os sinais sonoros são diferenciados para cada condição: (-de 37,5°C) um tipo de toque e (+ de 37,5°C) outro tipo de toque.

Esse termômetro possui função memória registrando a última medição. Se ao ligar o termômetro, permanecermos com o botão liga-desliga pressionado, visualizaremos a última medição efetuada.

Esterilização

Utilize álcool hidratado farmacêutico (etílico 95%). Mergulhe a ponteira (sensor) por um instante e seque. Pode-se utilizar um pano umedecido. Qualquer outro produto químico pode danificar o instrumento. Não coloque este produto em água fervente.

Cuidados

Evite submeter o termômetro a quedas ou impactos. Não o exponha ao sol ou a temperaturas elevadas. Não abra o compartimento da pilha, exceto no momento da troca. Não deixe este termômetro ao alcance de crianças, pois contém peças pequenas. Quando não utilizado, mantenha-o em seu estojo.

Troca da pilha

A pilha utilizada pode ser encontrada em joalherias ou lojas de artigos eletrônicos. Deve ser substituída quando aparecer no centro do visor apenas o desenho de uma pequena pilha. Vire o termômetro de cabeça para baixo, retire a tampa do compartimento superior do termômetro e substitua a pilha.

Respeite a polaridade da pilha!

Obs: Caso não ligue favor inverter a pilha.

Dados Técnicos

Faixa de medição: 32°C a 42°C

Resolução: 0,01°C

Erro máximo de indicação: $\pm 0,15^\circ\text{C}$

Temperatura de armazenamento/transporte: -20°C a 50°C

Função auto-desligamento: Após 10 minutos

Alimentação: 01 pilha de 1,5 Volts LR41, tipo botão

Vida útil de: 250h ou até 1.000 usos.

Dimensões aprox.: 140x22x11,5mm

Peso: 10g

Instrumento à prova d' água.

Haste flexível.

Informações complementares: Se, após o término da medição (sinal sonoro ativo - temperatura calculada finalizada), ficamos por um determinado tempo com o termômetro na axila, poderá ocorrer que a temperatura seja acrescida de no máximo 0,2°C do valor finalizado. Não é necessário se preocupar! Esta temperatura acrescida é chamada de temperatura do equilíbrio térmico e está previsto na portaria do INMETRO, anexo D.3.1.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas de nota autorizadas implicará na perda da garantia.

Resp. Téc.: Diego Zandona Nardin - CRQ: 05202514

VALIDADE INDETERMINADA

Registro ANVISA nº 10343209016

Portaria INMETRO nº 190 de 30/06/08

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19

Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470

www.incoterm.com.br

