

Incoterm

Garrote

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns pela escolha do Garrote Incoterm.

Para garantir melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as instruções deste manual, e guarde para eventuais consultas.

O Garrote Incoterm é indicado para punção venosa selecionando-se a pressão aplicada no braço do paciente.

Possui processo de auto-trava e regulagem de tensão. Ajuste fácil e confortável.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Pressione a presilha da cinta para baixo e puxe para abrir o garrote;
- 2- Coloque o garrote envolto ao braço e encaixe a presilha no lugar;
- 3- Puxe a cinta para apertar o garrote, porém verifique o fluxo arterial o mesmo não poderá ser interrompido. Para tal, basta verificar a pulsação do paciente. Mesmo garroteado, o pulso deverá continuar palpável;
- 4- Pressione o botão em baixo para soltar o garrote.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: fecho em plástico PVC, cinta elástica em material totalmente atóxico, sendo composta de 85 % de fibra de polyester e 15% de borracha natural (contém látex).

Dimensões: 450x20x30 mm.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Após a utilização limpe-o com um pano macio e levemente umedecido com água, não utilize produtos químicos. Guarde fora do alcance de crianças e em local sem exposição solar. Temperatura entre 0 a 40°C e umidade entre 30%UR a 80%UR.

Transportar em sua embalagem devidamente acondicionada nas caixas de transporte. Temperatura entre 0 a 40°C e umidade entre 30%UR a 80%UR.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Contém Látex natural. Pode causar alergia.

Não exponha o garrote a temperatura e umidade extremas.

Não puxe o elástico acima da tensão máxima.

Não use produtos químicos na limpeza.

Manusear com cuidado e leia as instruções de uso.

Não deixar ao alcance das crianças.

Não interromper o fluxo arterial. Para tal, basta verificar a pulsação do paciente. Mesmo garroteado, o pulso deverá continuar palpável.

Não mantenha o braço apertado por muito tempo.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida por 06(seis) meses, a partir da data de compra do produto e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

VALIDADE INDETERMINADA

Declarado Isento de Registro na Anvisa/MS
Número do cadastro Anvisa nº: 10343209023
Resp. Téc.: Diego Zandona Nardin – CRQ/RS: 05202514



CONTÉM 1 UNIDADE

Distribuído por: **Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: Honsun (Nantong) Co.,Ltd., Province, Jiangsu, China