

E100

Espaçador Incoterm

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

 **Incoterm**
Saúde e bem-estar



INTRODUÇÃO

O Espaçador Incoterm é destinado ao uso individual por pacientes sob cuidados ou tratamentos médicos. Este espaçador é indicado para administração de medicamentos em aerossol, disponíveis em dosificadores pressurizados popularmente denominados de “Bombinhas”, prescritos por médicos.

O produto foi desenvolvido para uso com ou sem máscara, de acordo com o paciente, criança ou adulto e com a orientação médica.


INSTRUÇÕES E LIMPEZA E DESINFECÇÃO

1. Antes e após a utilização do Espaçador Incoterm realize a limpeza.
2. Remova apenas a parte inferior do espaçador. Não remova a máscara e nem manipule a válvula durante a limpeza.
3. Lave todas as peças com água e detergente ou sabão neutro, enxague as peças com água filtrada.
4. Comece a assepsia mergulhando as peças em 1 litro de água filtrada morna com solução germicida a sua escolha por aproximadamente 20 minutos. Pode ser utilizada também solução a base de vinagre (ácido acético) na proporção de duas colheres de sopa para cada 1 litro de água.
5. Enxague as peças com água filtrada, retire o excesso de água e deixe secar naturalmente na posição vertical, não utilize álcool ou abrasivos para limpeza bem como pano, toalha de papel ou qualquer outro tipo de tecido para secar o interior da câmara.
6. Confira se o espaçador está seco antes do uso e recoloque novamente a parte inferior do espaçador.

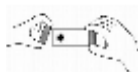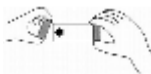

INSTRUÇÕES DE USO

1. Examine antes do uso o interior do espaçador para verificar se não há impurezas.
2. Encaixe a máscara ou utilize diretamente a boquilha.
3. Retire a tampa do aerossol e agite-o bem para assegurar a liberação adequada da medicação.
4. Conecte o aerossol no encaixe universal do espaçador conforme a ilustração ao lado.
5. Posicione a máscara no rosto ou a boquilha e pressione o jato do aerossol apenas uma vez.
6. Inspire lentamente o medicamento pela boca, segurando a respiração de 5 a 10 segundos e expire normalmente.

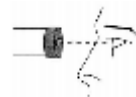

CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE O USO DO ESPAÇADOR INCOTERM.

PRECAUÇÕES:

Ao usar o espaçador Incoterm pela primeira vez, lava-lo seguindo as recomendações contidas neste manual.

RESTRIÇÕES:

Não se automedique e respeite a prescrição do seu médico

ADVERTÊNCIAS:

O espaçador Incoterm não deve ser utilizado por crianças para qualquer tipo de brincadeiras. Não deixe o espaçador Incoterm ou qualquer medicação ao alcance crianças. O espaçador deve ser usado sempre com a supervisão de um adulto. As membranas bivalvuladas são essenciais na administração da medicação, portanto não as retire a não ser no momento da limpeza.

CUIDADOS ESPECIAIS:

Se o médico prescrever dois ou mais jatos da medicação, aguarde 30 segundos para aplicar o segundo jato. Não se esquecer de agitar o aerossol antes de cada jato.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Temperatura: -10°C a 40°C

Unidade Relativa: até 80% UR, sem condensação.

ESPECIFICAÇÕES:

Dimensões corpo: 10,8 x 4,8 cm

Dimensões bocal: Ø 4 cm x 2,8 cm

Dimensões parte inferior: Ø 5,2 cm x 1,6 cm

Dimensões máscara: 7,6 x 9,3 cm

Volume: 175 mL

Peso: 40g

Composição:

PP médico (LIVRE DE BPA e DEHP) - Corpo do espaçador e bocal.

Plástico PVC - máscara, válvula e parte inferior.

VALIDADE INDETERMINADA

Resp. Téc.: Diego Zandona Nardin - CRQ: 05202514

Declarado Isento de Registro na Anvisa/MS

Número do cadastro Anvisa nº: 10343200032



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. A garantia de 06 meses (seis) não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal (Acessórios tais como: máscara e parte inferior do espaçador). Estas partes têm garantia de 90 (noventa) dias, também contados a partir da data de entrega efetiva do produto. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: Taian Dalu Medical Instrument Co., Ltd.— China

Rev000_07/2017_MKT/PNM