

PAC100

Amassador de
Comprimidos 3x1

Com função corta e porta.



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES

 **Incoterm**
Saúde e bem-estar

COMO CORTAR COMPRIMIDOS

- 1- Posicione o comprimido na área de corte;
- 2- Feche firmemente a tampa para baixo e a lâmina cortará o comprimido.

COMO ESMAGAR COMPRIMIDO

1. Desenrosque o fundo do cortador e coloque os comprimidos dentro;
2. Recoloque o recipiente no cortador;
3. Desenrosque o fundo do cortador para retirar os comprimidos esmagados.

COMO ARMAZENAR

1. Remova o cortador;
2. Coloque o comprimido no compartimento divisor;
3. Ou remova o compartimento divisor e armazene no recipiente ao fundo.

Atenção: Lâmina afiada. Tome cuidado ao cortar os comprimidos.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106

atendimento@incoterm.com.br