

S-DIV-0038.00

GARROTE LÁTEX FREE INCOTERM DESCARTÁVEL PARA FLEBOTOMIA



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES

 **Incoterm**
Saúde e bem-estar

O Garrote Látex Free Incoterm é indicado para punção venosa, para realização de exames, transfusão de sangue e interrupção de hemorragia. Para garantir melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as orientações dessa embalagem e guarde para eventuais consultas.

Principais orientações:



1-Posicione o garrote com o laço para cima, cerca de 10 cm do local que será puncionado, a fim de evitar a contaminação da área de punção;



2-Envolva o garrote no braço



3-Forme um laço;



4-Não aperte intensamente o garrote, pois o fluxo arterial não deve ser interrompido. Lembre-se que o pulso do usuário deve permanecer palpável.

ESPECIFICAÇÕES:

Dimensões: 25 mm x 450 mm x 0.6 mm.

Composição: Material produzido em TPE.

Cor: Azul.

VALIDADE: 3 anos

Após abrir use-o o mais rápido possível.

Armazenar em suas embalagens primárias em temperatura ambiente. Evitar exposição solar.

Transportar em suas embalagens primárias em temperatura ambiente.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 01 (um) mês a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br

