

# BALANÇA Corporal Digital

GARANTIA  
**6** Meses

Foto meramente ilustrativa



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO: 28010

 **Incoterm**  
Saúde e bem-estar

## Balança Eletrônica Digital

### MANUAL DO USUÁRIO

---

Obrigado por escolher esta balança eletrônica pessoal. Para garantir a operação apropriada e para manter o tempo de vida da balança, por favor, leia este manual com cuidado antes da utilização.

#### Especificações:

1. Equipada com sistema de quatro sensores de calibração de massa.
2. Plataforma de vidro temperado.
3. Capacidade: 6 kg-150 kg
4. Divisão: 0.1 kg
5. Exatidão:  $\pm 0,7\text{kg}$
6. Visor de LCD
7. Liga automaticamente
8. Auto-zero e desligamento automático.
9. Indicação de pilha fraca e de sobrecarga.
10. Interruptor livre com três unidades diferentes: kg/lb./st.
11. Alimentação: 1 Pilha de 3V CR2032 (inclusa)

#### Operação

1. Retire o lacre da pilha, no suporte da pilha na traseira da balança.



2. Posicione a balança em uma superfície sólida e plana.
3. Suavemente suba na balança, a massa irá aparecer no display.
4. Permaneça na plataforma de vidro durante a medição, o display piscará indicando o final da medição. Sua massa será exibida por 10 segundos, e então a unidade irá se desligar automaticamente.


#### Atenção

1. Para garantir a precisão, nós sugerimos que você realize a medição em um horário fixo todos os dias (ex.: 7:00pm-9:00pm).

2. Por favor, troque a pilha quando o display mostrar “LO”, que indica que a pilha descarregou.



3. Quando o display mostrar “Err”, indica uma sobrecarga.

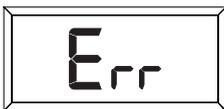

### **Atenção**

1. Tire os calçados antes de realizar a medição, evitando assim, arranhões ou riscos na plataforma de vidro.
2. A plataforma de vidro pode ficar bem escorregadia quando molhada, garanta que tanto o vidro quanto os seus pés estejam secos antes da utilização.
3. Por favor, utilize um tecido macio com álcool ou limpador de vidros para limpar a superfície quando suja. Não utilize sabão ou outros produtos químicos. Mantenha afastado de lugares úmidos, calor e frio extremo.
4. A balança é um instrumento de precisão. Nunca pule, bata ou desmonte a balança. Carregue-a com cuidado para evitar que caia.
5. Essa balança digital é exclusivamente destinada ao uso doméstico e pessoal.
6. Por favor, confira a pilha se a balança apresentar mau funcionamento. Troque por uma nova, se necessário. Para outros problemas, entre em contato com o revendedor local ou diretamente com a Central de Atendimento ao cliente.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19  
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470  
[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)

Origem: China



**Incoterm**  
(51) 3245.7141  
3245.7106

[atendimento@incoterm.com.br](mailto:atendimento@incoterm.com.br)

Rev 002\_11/2016\_MKT/PNM