


PCA050

Porta Comprimidos
com Alarme Incoterm

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**

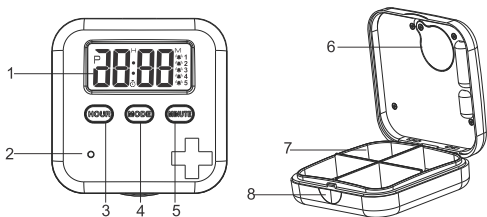

Descrição do produto

1. Visor;
2. Campainha;
3. Botão de ajuste da Hora;
4. Botão de ajuste do Modo;
5. Botão de ajuste do minuto & START/STOP para o Timer;
6. Tampa do compartimento da pilha;
7. Compartimento para comprimidos;
8. Trava da tampa do porta comprimidos.

Características


1. Cinco alarmes diários programáveis;
2. Alarme sonoro e vibratório;
3. Quatro compartimentos para medicamento;
4. Alarmes de fácil ajuste;
5. Relógio com opção de formato 12/24 horas;
6. Timer regressivo com alarme (Max. 23 horas e 59 minutos).
7. Tamanho compacto para fácil transporte no bolso ou bolsa.

Iniciando

- Retire o isolador da bateria para ativar o relógio.
- Pressione e segure o botão MODE por 2 segundos até que o visor LCD esteja ativado.

Relógio, Alarme e Timer

Pressione o botão MODE simultaneamente para ver os vários modos disponíveis:

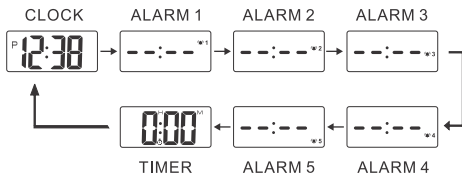

Ajuste do Relógio

- No modo Relógio, pressione e segure o botão MODE até que os dígitos estejam piscando.
- Pressione os botões HOUR/MIN até atingir o valor desejado, para ajustar a hora atual. Alternativamente, pressione e segure os botões HOUR/MIN para avançar rapidamente. Solte o botão quando o valor desejado estiver selecionado.
- Pressione o botão MODE para confirmar o ajuste, ou aguarde um minuto sem pressionar qualquer botão.

Formato 12/24 horas

No modo relógio, pressione o botão HOUR para selecionar entre os formatos 12 ou 24 horas. No formato 12 horas, a letra 'P' irá aparecer quando a hora estiver entre 12:00pm até 11:59pm.


Ajuste do Alarme

Alarme 1:

- Pressione o botão MODE até que o display mostre o ícone do alarme 1: “🔔 1”.
- Pressione e segure o botão MODE até que os dígitos comecem a piscar para entrar no modo de ajuste.
- Pressione os botões HOUR/MIN para ajustar a hora desejada para o alarme.
- Quando a hora de alarme estiver ajustada, pressione o botão MODE para confirmar. O Alarme 1 irá parar de piscar. O visor mostrará a hora de alarme ajustada para o Alarme 1 e o ícone “🔔 1” estará visível.
- Para ajustar a hora de alarme para o Alarme 2 (🔔 2), Alarme 3 (🔔 3), Alarme 4 (🔔 4), Alarme 5 (🔔 5), siga os mesmos procedimentos para o Alarme 1.

Desativar alarme

- Pressione o botão MODE para selecionar a hora de alarme (1 até 5), que você deseja desativar.
- Pressione o botão MIN, a hora de alarme irá mudar para 4 linhas (veja o diagrama abaixo). O alarme está desativado:

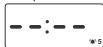

Som do alarme / Vibração


Quando o alarme disparar, ele apresentará a seguinte sequência de som/vibração do alarme.

- Primeiros 10 segundos: Som e Vibração;
 - Próximos 30 segundos: Som em uma velocidade rápida;
 - Últimos 20 segundos: Som e vibração em uma rápida velocidade.
- Pressione qualquer botão para parar o som do alarme e a vibração.

Timer Regressivo

- Pressione o botão MODE até que o visor mostre o modo TIMER:



- Pressione e segure o botão MODE até que os dígitos comecem a piscar.
- Pressione os botões HOUR/MIN para ajustar a contagem regressiva desejada.
- Pressione o botão MODE para confirmar o ajuste do temporizador.
- Uma vez que comece a contagem regressiva, o ícone  irá começar a piscar.
- Quando o temporizador atingir o seu minuto final, o visor irá mudar e mostrar a contagem regressiva para os últimos 59 segundos:




- O alarme sonoro e vibratório ficará ativo durante 1 minuto, similar a função Alarme.
- Pressione qualquer botão para desativar o alarme.
- Quando o alarme é desativado, o display irá retornar para o ajuste de contagem regressiva feita anteriormente.
- Para ajustar uma nova contagem regressiva, pressione e segure o botão MODE para entrar no modo de ajuste.

Observação: Uma nova contagem regressiva somente poderá ser ajustada quando o temporizador estiver parado. Se o temporizador estiver realizando a contagem, pressione o botão MIN para desativá-lo.

Se no modo relógio, o ícone do timer estiver ativo, significa que a contagem regressiva está ativa.



Substituição da bateria

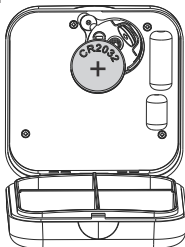

- Abra tampa do porta comprimidos com o compartimento das pilhas voltado para você.
- Remova o parafuso da tampa do compartimento das pilhas.
- Retire a pilha usada e coloque uma pilha nova.
- Recoloque a tampa do compartimento e o parafuso.
- Ajuste o relógio e os alarmes.

Especificações Técnicas

Comp. para medicamento	4 compartimentos
Formato Relógio	12 / 24 horas
Quantidade de Alarmes	5 alarmes individuais
Timer regressivo Max.	23 horas e 59 segundos
Alarme	Sonoro e Vibratório
Alimentação	1 pilha CR2032 3V
Dimensões	65 x 65 x 22 mm
Peso	43g (somente instrumento)
Material	Plástico PP
Duração da Bateria	Aprox. 4 meses



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 01 (um) ano a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: **Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
TeL: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



C · A · C

Incoterm

(51) 3245.7141
3245.7106

atendimento@incoterm.com.br

Origem: China

Rev_000_09/2018-MKT/PNM