

BALANÇA CORPORAL

Digital Incoterm

BC100



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES

 **Incoterm**
Saúde e bem-estar

Introdução

Obrigado por escolher a Balança Corporal Digital BC100 Incoterm. Para garantir o funcionamento correto e manter a durabilidade da balança, antes de usar, leia atentamente o manual de instruções antes de usar e o guarde para consultas futuras.

Especificações:


1. Equipada com 4 sensores de medição de massa.
2. Plataforma de vidro temperado de 5mm
3. Capacidade: de 5 kg a 150 kg
4. Divisão: 0.1 kg
5. Exatidão:
 - ±0.6Kg de 0 a 50Kg;
 - ±1.1Kg de 50.1Kg a 100Kg
 - ±1.6Kg de 100.1Kg a 150Kg
6. Visor de Cristal Líquido
7. Acionamento por pressão
8. Desligamento automático
9. Indicação de pilhas fracas ou de sobrecarga
10. Interruptor para troca da unidade de medida
11. Alimentação: 1 Pilha de 3V CR2032 (Inclusa)
12. Peso líquido: 1 Kg
13. Dimensões: 280x260x20 mm

Operação

1. Retire o lacre da pilha, no compartimento na parte traseira da balança.
2. Posicione a balança em uma superfície firme e plana.
3. Suba na balança. O valor medido será exibido no visor.
4. Permaneça na plataforma de vidro durante a medição. O visor piscará indicando o final da medição. Seu peso será exibido durante 10 segundos. Após, a balança desligará automaticamente.

Atenção

1. Para que a medição seja exata, a medição deve ser realizada no mesmo período do dia.
2. Quando a descrição "LO" aparecer no visor, substitua a pilha.

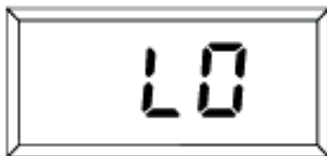

3. Quando a descrição "Err" aparecer no visor, indica sobrecarga de peso.

Cuidado

1. Ao realizar uma medição, retire os calçados para evitar arranhões e riscos na plataforma de vidro.
2. A plataforma de vidro pode ficar escorregadia se estiver molhada. Para sua segurança, certifique-se de que a plataforma e seus pés estão secos.
3. Para limpar a plataforma de vidro, utilize um pano macio com álcool ou limpador de vidros. Não utilize sabão ou outros produtos químicos.
4. Mantenha a balança em local protegido de luz solar direta, calor e frio extremo ou umidade.
5. A balança é um instrumento de precisão. Não pule, bata ou a desmonte. Manuseie com cuidado para evitar quedas.
6. Esta balança é destinada somente para uso doméstico e pessoal.
7. Se a balança apresentar mau funcionamento, verifique a pilha.
8. Se o problema persistir entre em contato com o revendedor ou com a central de atendimento ao consumidor.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: China

Rev 000_08/2020_MKT/PNM