

# UMD 110

Umidificador

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE  
INSTRUÇÕES**



**Incoterm**  
Saúde e bem-estar

## **APRESENTAÇÃO DO PRODUTO**

Parabéns pela escolha do umidificador Incoterm.

Para garantir melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as instruções deste manual de instruções, e guarde para eventuais consultas.

O umidificador Incoterm é indicado para repor a umidade e qualidade do ar em locais de clima seco e regiões poluídas, proporcionando alívio e bem estar.

Produz uma névoa fina e homogênea de vapor frio e inodoro capaz de umidificar e purificar o ar em ambientes sem alterar a temperatura, como: salas, quartos e escritórios.

## **CUIDADOS IMPORTANTES**

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluídas as seguintes.

1. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
2. Conecte o umidificador a uma tomada apropriada.
3. Mantenha o umidificador longe de produtos inflamáveis e explosivos.
4. Não retire o conector da tomada com as mãos molhadas.
5. Não limpe o umidificador enxaguando-o na pia.
6. Não mergulhe o umidificador na água.
7. Não desmonte o umidificador.
8. Mantenha o umidificador longe do alcance das crianças e animais. Não permita que o produto seja manuseado por crianças, mesmo que o umidificador esteja desligado.
9. Mantenha o cabo de energia livre e não o force a qualquer momento.
10. Mantenha o umidificador longe da luz solar direta, fontes de calor, ar condicionado ou ventiladores.
11. Não incline o produto. Isso pode fazer com que a água entre na parte elétrica e cause mal funcionamento.

12. Não use qualquer aparelho com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por outro com mesmo tipo e tamanho ou levar o umidificador à assistência técnica.
13. Não coloque o umidificador perto de fogão a gás, fogão elétrico ou forno aquecido.
14. Coloque o aparelho em superfície plana e estável, mantendo-o longe da borda da superfície para evitar acidente.
15. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
16. Para proteger contra choque elétrico, não mergulhe a base do umidificador na água.
17. Não tente esvaziar, encher ou inclinar o umidificador enquanto ele estiver em funcionamento.
18. Não use o aparelho ao ar livre.
19. Não use este aparelho no que não seja para seu uso pretendido.
20. Para uso doméstico apenas, sem fins de tratamento médico ou condições ambientais de locais de fabricação/armazenamento.
21. Guarde esse manual para consultas futuras.

### **ATENÇÃO**

Não utilize aditivos na água como óleos, essências, fragrâncias, pois podem danificar o aparelho. Assim como não coloque metais, produtos químicos ou detergentes no reservatório de água. Utilize apenas água limpa.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tensão nominal: 100V - 240V

Frequência: 50 – 60 Hz

Potencia: 25 W

Método de nebulização: Cavitação por Ultrassom

Capacidade do reservatório: 3 L

Capacidade de saída de névoa: 230 ml/h

Autonomia: 12 horas

Área de abrangência do ambiente: 20m<sup>2</sup>

Potência: 25 Watts

Dimensões: 151x166x298mm

Peso líquido: 920 g

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Abra a embalagem e verifique o aparelho e as peças, se houver algum dano ou falta de peças, entre em contato com o vendedor.
2. Coloque o umidificador em uma superfície plana. Não coloque o dispositivo em uma superfície molhada ou sob luz solar direta.
3. Remova o reservatório de água do dispositivo.
4. Desenrosque a tampa do reservatório e adicione água. Não use água quente.
5. Feche a tampa do reservatório de água, recoloque o reservatório de água e a tampa do reservatório de água. Tenha cuidado para não colocar água na saída de ar.
6. Ligue o aparelho na tomada de rede elétrica.
7. Não deixe o umidificador apoiado sobre o cabo elétrico. Ligue o aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
8. Em seguida ligue o umidificador. Não manuseie o umidificador com as mãos molhadas.
9. Controle a névoa de 0 a 230 ml/h girando o botão de controle da névoa.

10. Após alguns segundos, a névoa começará a sair através do bico de saída da névoa.

11. Desligue após o uso.

**AVISO:** Quando o umidificador não for utilizado, por favor, desligue-o.

**NOTA:** É normal ouvir um som de gotejamento quando o controle de névoa estiver no nível máximo.

### **LED DE INDICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**

**VERDE:** A unidade está funcionando perfeitamente.

**VERMELHO:** O compartimento de água está vazio.

Abasteça o reservatório de água.

### **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Após usar por 5 ou 6 vezes ou de 3 a 5 dias, limpe o dispositivo de acordo com as instruções abaixo.

1. Limpe a parte externa da base da unidade com um pano úmido.
2. Não use materiais abrasivos para limpeza.

3. Desligue o aparelho da tomada antes de limpar. Retire o reservatório de água. Não manusear o umidificador com as mãos molhadas.
4. Despeje a água restante do reservatório no lado oposto da saída de névoa. Evite a entrada de água na saída de névoa.
5. Adicione uma quantidade pequena de detergente líquido suave com água morna e limpe suavemente com uma esponja.
6. Retire a água. Tenha cuidado para não colocar água na saída de ar.
7. Nunca mergulhe a unidade na água nem lave na pia.
8. Seque com um pano limpo.
9. Se você não pretende usar a unidade por um tempo, guarde o umidificador limpo com todas as suas peças e o manual para uso futuro.

### **COMO LIMPAR O RESERVATÓRIO DE ÁGUA**

1. Encha o reservatório com água.
2. Coloque detergente suave e agite-o bem.
3. Agite e segure-o com as duas mãos.

Nota: o reservatório de água deve ser limpo uma vez por semana.

## **COMO LIMPAR O TRANSDUTOR E A BACIA DE ÁGUA (BASE)**

1. Para remover o resíduo de água, despeje cerca de 2 colheres de sopa de vinagre branco e adicione água na bacia (base). Certifique-se de ter preenchido a bacia inteira de água, mas não até a borda.
  2. Deixar a água com vinagre durante pelo menos uma hora e meia.
  3. Escovar a solução no transdutor e nas áreas incrustadas com resíduo de água. Utilize uma escova de cerdas macias.
  4. Após descarte a solução e lave-o bem.
  5. Em hipótese alguma mergulhe a bacia (base) na água.
- NOTA: Limpe o transdutor e a bacia (base) pelo menos uma vez por mês para evitar o acúmulo de resíduos de água.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

<b>PROBLEMA</b>	<b>Motivo</b>	<b>SOLUÇÃO</b>
<b>Led indicador esta desligado, sem vento, sem névoa.</b>	Conectado ou não.	Ligue
	A fonte de energia esta ligada ou não.	Ligue a fonte de energia.
<b>Led indicador está desligado, com vento, sem névoa.</b>	O reservatório esta com água ou não.	Coloque água no reservatório de água.
	O botão virou ou não.	Gire o botão.
	A tampa do nível de água esta apertada ou não.	Aperte a tampa.
<b>Odor estranho procedente da névoa.</b>	Umificador novo.	Abra o reservatório de água e o coloque em uma local seco por 12 horas.
	O reservatório de água não esta limpo.	Limpe o reservatório de água e troque a água.
<b>Led indicador esta ligado, sem vento, sem névoa.</b>	Verifique o nível da água na base, se há água demais.	Retirar um pouco de água.
<b>Pouca névoa.</b>	Transdutor com resíduos.	Limpe-o.
	A água foi usada por muito tempo.	Troque por água limpa.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 01 (um) ano a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

#### **VALIDADE INDETERMINADA**

**Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos.**



Importado por: **Incoterm Indústria de Termômetros LTDA**  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.252/0001-19  
Tel: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470  
[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



Origem: Zhongshan Huida / China

Rev 001\_10/2020\_MKT/PNM