

Protape

Bandagem autoaderente

Cohesive Incoterm 5cm x 4,5m

Desenvolvida em não tecido, sendo leve e porosa, a Bandagem autoaderente Cohesive Incoterm proporciona estabilidade na imobilização com conforto, fornece ainda suporte forte, flexibilidade, além de compressão controlada. Produto ideal para pessoas que tenham pele delicada e onde o esparadrapo não possa ser aplicado.

Características

- Hipoalergênica;
- Não contém látex;
- Não possui medicamento em sua composição;
- Adere a si mesmo;
- Fácil de rasgar e aplicar;
- Não necessita de cliques para fixação.

Para usar em:

Terapias de compressão, onde há necessidade de estímulo da circulação sanguínea e estabilização de membros. Além de estimular a circulação sanguínea por compressão, também ajuda a sustentar e dar estabilidade às regiões enfaixadas, como pernas e braços, auxiliando a prevenir ou tratar entorses, fraturas, deslocamentos e distensões musculares.

- Para aplicar em uma área da articulação lesionada para reduzir o inchaço e aliviar a dor;
- Dar suporte para pulso, tornozelo;
- Proteger a mão, o dedo;

- Segurar tala, bolsa de gelo ou outros objetos;
- Aplicar em animais para curativos de primeiros socorros.

Como aplicar

1. Verifique se a pele está limpa e seca.
2. Pegue o rolo em uma mão e puxa a ponta com a outra mão.
3. Aplique na área desejada e enrole levemente ou estique bem. Ao enrolar a bandagem ela adere a si mesma, completando a ação.

Informações técnicas

- Comprimento: 4,5m;
- Largura: 5cm;
- Adesivo: cola adesiva acrílica hipoalergênica ativada;
- Composição: 95% Tecido não Tecido, 5% Spandex (elastano);
- Cores disponíveis: Branco, Bege, Preto.

Cuidados e advertências

- Para o tratamento de patologias e aplicações pós-cirúrgicas procure um profissional de saúde capacitado no método de aplicação de bandagens;
- A bandagem deve ser aplicada sobre a pele limpa, livre de sujeira e suor;
- Em caso de desconforto e reação adversa, interrompa imediatamente o uso da bandagem e procure ajuda

profissional;

- Nunca utilize a bandagem sobre uma ferida aberta;
- Não enrole a bandagem muito apertada, pois pode cortar o fluxo sanguíneo;
- Pessoas com pele sensível à composição do produto podem apresentar reações alérgicas. Neste caso interrompa o uso imediatamente.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia, bem como a troca incondicional do mesmo caso detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 03 (três) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Resp. Técnico: Diego Zandonana Nardin CRQ/RS: 05202514
Número de notificação junto à ANVISA: 1034200052



Importado por: Incoterm Soluções em Medicina LTDA
Av. Eduardo Prado, 1610 - Porto Alegre/RS | CEP: 91.153-400 | CNPJ: 11.558.262/0001-18
Tel: 51 3063.7100 | www.incoterm.com.br



Original: Woon Woonho Healthcare Products Co., Ltd ADDRESS No. 1600 APTON 2 ROAD AIR TOWN YONGIN DISTRICT GYEONGGI 211465, CHINA
Rev. INC_00_001_001_001