



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia, bem como a troca incondicional do mesmo caso detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Resp. Técnico: Diego Zandona Nardin / CRO/RS: 05202514
Declarado isento de registro pela ANVISA/MS
Número de cadastro ANVISA: 10343200053
Validade: 3 anos

Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA,
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19
Tel: 51 3245.7100 | Fax: 51 3248.1470
www.incoterm.com.br



Origem: Wuxi Wemede Healthcare Products Co., Ltd ADDRESS: N° 1060
ANTAI 3 ROAD AN TOWN XISHAN DISTRICT, WUXI 214105 CHINA

Rev 003_08/2023_MKT/PNM

S-BAN-0150.00

Protape Pré Bandagem
em Espuma Incoterm



Foto meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Desenvolvida 100% em espuma de poliuretano, a **Protape Pré Bandagem em Espuma Incoterm** é um produto altamente poroso e confortável, adaptável a qualquer parte do corpo, pode ser cortado manualmente.

Características

- Elástica
- Super fina
- Leve e Porosa
- Não adere na pele
- Aplicação fácil e desenrolar suave
- Remoção fácil e rápida

Para usar em:

Proteção da pele, antes da aplicação de bandagens e gesso. Evita que o adesivo entre em contato direto com a pele, eliminando a dor na remoção e a possibilidade de os pelos serem arrancados.

Como aplicar

1. Verifique se a pele está limpa e seca.
2. Pegue o rolo em uma mão e puxe a ponta com a outra mão.
3. Aplique na área desejada.

Informações Técnicas

- Comprimento: 27 m.
- Largura: 7 cm.
- Espessura: 0,6 mm.
- Composição: 100% espuma de poliuretano.

Cuidados e Advertências

- Não aplicar sobre regiões inflamadas, machucadas ou com escoriações.
- Não aplicar sobre celulite ou infecções ativas.
- Não utilizar em atividades aquáticas.
- Em caso de desconforto e reação adversa, interrompa imediatamente o uso da bandagem e procure ajuda profissional.
- Pessoas com pele sensível à composição do produto podem apresentar reações alérgicas. Neste caso interrompa o uso imediatamente.