

Como é que funciona?

A fita PROTAPE Incoterm pode ser usada para permitir o movimento completo das articulações.

A aplicação da fita PROTAPE sobre a pele não só tem efeito local, mas também sobre os tecidos e músculos subjacentes.

A fita PROTAPE utiliza sua elasticidade para levantar a pele dos tecidos subjacentes, por essa propriedade, a pele é levantada a partir da derme (camada subcutânea) melhorando a circulação e a absorção de líquidos.

Principais efeitos da fita PROTAPE

- Suporte muscular: melhora a capacidade do músculo de se contrair, mesmo quando ele está fraco. Reduz a sensação de dor e fadiga. Protege os músculos das câibras ou do alongamento excessivo.
- Eliminar o congestionamento de fluidos corporais – melhora a circulação sanguínea e linfática, também reduz a inflamação dos tecidos.
- A ativação do sistema analgésico endógeno – significa que a fita deve facilitar os mecanismos de auto-cura do corpo. Isso também é um ponto importante da osteopatia e quiropraxia.
- Corrigir problemas articulares – a meta é melhorar o alinhamento dos ossos e o movimento através da regulação da atividade dos músculos fracos ou contraídos. No caso de dor ciática (inflamação do nervo ciático), cruralgia ou nevralgia cervico-braquial, o kinesio taping não é indicado porque os sintomas surgem dos nervos que estão em áreas profundas do corpo e não nos tecidos que se encontram sob a pele.



Característica

- Cola acrílica hipoalergênica
- Não contém látex
- Não possui medicamento em sua composição
- Elasticidade semelhante a da pele, possibilita transpiração normal dos poros, proporciona conforto e flexibilidade.
- Resistente à água, pode ser usada durante o banho e em qualquer atividade aquática.
- Auxilia no aumento do desempenho físico.
- Corrige função muscular e alterações articulares.
- Fornece suporte ao músculo, estimulando e inibindo a contração muscular.
- Melhora a circulação sanguínea e linfática, sendo eficaz na absorção de edemas e hematomas.

Para usar em:

O campo de aplicação é muito grande: da articulação Temporomandibular até doenças do pé.

Hoje, graças a sua simplicidade, a fita PROTAPE Incoterm é amplamente utilizada tanto por pessoas comuns quanto por atletas de alto nível.

- Entorses
- Distensões
- Dores e espasmos musculares
- Inflamações
- Edemas e hematomas



Como aplicar:

- Aplique 30 minutos antes da atividade física.
- Limpe a pele e remova o excesso de pelos para melhorar a adesão.
- Corte a bandagem no comprimento certo para a aplicação.
- Depois de aplicada, esfregue bem a bandagem para ativar o adesivo.

Para realizar a medida da tensão aplicada, estique a bandagem ao máximo. Diminua peça metade para chegar em 50% e pela metade novamente para chegar em 25%. As porcentagens são valores aproximados, o que não impacta no resultado da aplicação.

Informações técnicas:

- Comprimento: 5m
- Largura: 5cm
- Adesivo: cola adesiva acrílica hipoalergênica ativada pelo calor.
- Composição: 95% Algodão, 5% Spandex (elastano).
- Elasticidade: 170% a 180%
- Cores disponíveis: Bege, Azul, Rosa e Preto.

Cuidados e advertências:

Para o tratamento de patologias e aplicações pós-cirúrgicas procure um profissional de saúde capacitado no método de aplicação de bandagens elásticas. A bandagem deve ser aplicada sobre a pele limpa, livre de sujeira e suor.

O uso prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas com pele sensível. Recomenda-se a substituição da bandagem de acordo com orientações profissionais.

Em caso de desconforto e reação adversa, interrompa imediatamente o uso da bandagem e procure ajuda profissional. Retire a bandagem lentamente para evitar irritações ou lesões na pele. Pessoas com pele sensível à composição do produto podem apresentar reações alérgicas. Neste caso interrompa o uso imediatamente.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia, bem como a troca incondicional do mesmo caso detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 03 (três) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Resp. Técnico: Diego Zandona Nardin / CRQ/RS: 05202514

Declarado isento de registro pela ANVISA/MS

Número de cadastro ANVISA: 10343200033

Validade: 3 anos



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA.
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100
www.incoterm.com.br



C · A · C

atendimento@incoterm.com.br

Incoterm

(51) 3245.7141
3245.7106

Origem: Wuxi Wemade Healthcare Products Co., LTD/China

Rev 004_12/2023_MKT/PNM