

MASSAGEADOR

Corporal Comfort

Foto meramente ilustrativa



MANUAL DE INSTRUÇÕES

 **Incoterm**
Saúde e bem-estar

MASSAGEADOR

COMFORT - Ref.: M-737

Parabéns pela escolha do Massageador COMFORT portátil da Incoterm. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir.

Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

INTRODUÇÃO

A rotina de trabalho, preocupação, trânsito e todos os outros males da vida moderna deixam o corpo tenso, sendo difícil relaxar e descansar depois de um dia difícil, mesmo após chegar em casa. Apresentamos o novo massageador COMFORT para melhorar seu bem-estar, você vai sentir-se mais tranquilo, com mais energia e vitalidade.

O COMFORT é o massageador portátil que você precisa para relaxar e aliviar as tensões dos músculos cansados, garantindo uma sensação agradável e relaxante por todo seu corpo. Versátil, ele pode ser utilizado com um dos três cabeçotes para massagear o corpo de maneira completa ou ainda pontos específicos, seu design permite massagear costas, nuca, pernas, pés e braços.

Com o COMFORT você vai relaxar!

MODO DE FUNCIONAMENTO (OPERAÇÃO)

- Antes da primeira utilização desenrosque a tampa das pilhas na parte superior do instrumento e insira 3 pilhas tipo AAA.
- Garanta que a tampa está firmemente apertada após fechar.

- Para começar a usar no corpo, aplique uma leve pressão na parte superior do massagador para começar a vibração.
- Para parar a vibração pare de pressionar o massagador.

ATENÇÃO

Mantenha o massagador longe de fontes de calor.

Para limpar o massagador, utilize um pano macio levemente umedecido com água.

Utilize o massagador com cuidado. Retire as pilhas quando o massagador estiver fora de uso por longos períodos.

Importante: não utilize o massagador na mesma área do corpo por mais de 5 minutos.

Não ultrapasse o limite de 20 minutos a cada uso.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



Nota: Ajude a preservar o meio-ambiente, coloque pilhas usadas no depósito correto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de uso: 5°C a 40°C

Alimentação: 3 pilhas de 1,5V tipo AAA

Dimensões: 120 x 95 mm

Peso: 145g

Durabilidade das pilhas: média de 30 minutos de uso contínuo

Este produto não é à prova d'água.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação.

Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas de nota autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19
Tel: 51 3245.7100 | www.incoterm.com.br



Origem: China.

Rev 002_02/24_MKT/P&D