

CT012.01

Caixa Térmica com Termômetro

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**



Incoterm
Saúde e bem-estar



Especificações da Caixa Térmica

Capacidade	12 L
Material	Polipropileno, Poliestireno, Polietileno e Poliuretano
Isolamento Térmico	Poliuretano
Cor	Branco/Azul
Dimensões Externa	35 cm x 24,5 cm x 25 cm
Dimensões Interna	29 cm x 20,5 cm x 22,5 cm
Alça	Polipropileno (PP)
Peso	1.570 Kg
Código	CT012.01
Código de barra	7899828232556
NCM	3923.10.90
Aliq. IPI	9,75%



Especificações do Termômetro

Referência	7424.02.1.00
Faixa de utilização	-50°C + 70°C/°F
Precisão	± 1°C para a escala de -20°C a +50°C e ± 2 °C no restante da escala
Resolução	± 0,1°C/°F
Pilha	1x 1,5 AAA
Peso	80g
Medidas do produto	60x39x14mm
Camp. do cabo	50cm

Principais Características

Caixa térmica com termômetro (opcional).
Fabricada em plástico de alta resistência e fácil limpeza. Produzida com revestimento interno em poliuretano, que auxilia no isolamento térmico.

Conservação de vacinas e substâncias sensíveis durante o transporte ou acondicionamento por curto período fora de equipamentos refrigeradores.
--

Com o apelo de qualidade total e segurança, a nova caixa térmica Incoterm conserva e apresenta a temperatura interna e sua oscilação, através do termômetro de máxima e mínima. Traz em sua composição o isolamento térmico, além de ser leve, atóxica e de fácil higienização. Desenvolvida em modelo compacto de 12 litros, possui alça rígida com trava de segurança que impede a abertura acidental da tampa e permite total vedação.

Recomendações para uso e cuidados

Antes de usar o recipiente, esfrie-o com água gelada, ou gelo. Os materiais devem estar resfriados, tanto quanto possível.

Preencha a caixa com os materiais a conservar, diminuindo os espaços de ar quente. Adicione gelo (blocos de gelo duram mais), ou substitutos de gelo, na parte superior, pois o ar frio desce. Pode-se usar gelo, porém somente empacotado, evitando contato com o plástico do interior das caixas.

Alimentos perecíveis, como carnes e produtos lácteos, devem ser embalados com gelo e reembalados para manterem-se secos. O gelo derretido não necessita ser drenado, pois ajuda a manter o conteúdo do recipiente mais frio, por mais tempo.

Para a melhor conservação dos materiais, evite abrir a tampa com frequência.

Mantenha a caixa térmica em posição vertical, fora do alcance da luz solar e não guarde-a por períodos longos no porta-mala do carro.

Não golpeie as partes plásticas com objetos duros ou pontiagudos.

Este produto não foi desenvolvido para conservação de materiais quentes.

Limpeza

Retirar o termômetro antes de realizar a limpeza. Ver instruções a seguir "retirada do termômetro para troca".

Lavar a caixa térmica com sabão neutro e água morna, ou bicarbonato e água.

Para esterilização, utilizar apenas álcool 95% e secar cuidadosamente as caixas após o uso.

Mantenha as caixas térmicas sem a tampa, até que estejam completamente secas. Após a secagem, tampá-las e armazená-las em local adequado.

A higienização da caixa e do meio onde os imunobiológicos serão armazenados devem atender as exigências e regulamentações dos órgãos fiscalizadores, como ANVISA.

Retirada do Termômetro para troca de pilha e higienização

Na parte interna da caixa existe um orifício pelo qual o sensor e o cabo do termômetro passam. Através desse orifício, utilizando um objeto arredondado na ponta, empurre levemente o termômetro até que seja possível retirá-lo por completo com as mãos.

As instruções para substituição da pilha encontra-se disponível no site da Incoterm.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA.
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100
www.incoterm.com.br



Distribuído por Incoterm. Origem: Brasil.

Rev 002_04/2025_MKT/PNM