

# GARROTE GR100



## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O Garrote Incoterm GR100 é indicado para punção venosa, controlando a pressão aplicada no braço do paciente. Possui processo de auto-trava e regulação de tensão. Ajuste fácil e confortável.

## INSTRUÇÕES DE USO

- 1 – Pressione botão na parte superior da fivela e puxe a presilha da cinta para abrir o garrote.
- 2 – Coloque o garrote envolto ao braço e encaixe a presilha na fivela.
- 3 – Puxe a cinta para apertar o garrote. Verifique o fluxo arterial, o mesmo não poderá ser interrompido. Para tal, basta verificar a pulsação do paciente. Mesmo garroteado o pulso deverá continuar palpável.
- 4 – Pressione o botão e puxe a presilha para soltar o garrote.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Fecho em plástico PVC, cinta elástica em material atóxico, sendo composta de 50% de fibra de poliéster e 50% de plástico ABS (Não contém látex).

Dimensões: 400 x 2 x 25 mm.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Após a utilização limpe-o com um pano macio e levemente umedecido com água, não utilize produtos químicos. Guarde fora do alcance de crianças e em local sem exposição solar. Temperatura entre 0°C e 40°C e umidade inferior a 92% UR.

## ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Não exponha o garrote a temperatura e umidade extremas.
- Não puxe o elástico acima da tensão máxima.
- Não use produtos químicos na limpeza.
- Manusear com cuidado. Leia as instruções de uso.
- Não deixar ao alcance das crianças.
- Não interromper o fluxo arterial. Verificar a pulsação do paciente. Mesmo garroteado, o pulso deverá continuar palpável.
- Não mantenha o braço apertado por muito tempo.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida por 06(seis) meses, a partir da data de compra do produto e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

### VALIDADE INDETERMINADA

Declarado Isento de Registro na Anvisa/MS  
Número do cadastro Anvisa nº: 10343200039  
Resp. Téc.: Diego Zandoná Nardin – CRQ/RS: 05202514

### CONTÉM 1 UNIDADE

Rev003\_06/2023\_PNM/MTK

Distribuído por: Incoterm Soluções em Medição LTDA  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000  
CNPJ 87.156.352/0001-19 | Tel.: 51 - 3245.7100  
[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



Origem: Yuyao Guangjing Medical Instrument Co., Ltd.  
Yuyao City, Zhejiang Province, China