

# **ASPIRADOR NASAL MANUAL INCOTERM AN050 S-DIV-0021.00**


Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE  
INSTRUÇÕES**

 **Incoterm**  
Saúde e bem-estar

**Importante! As instruções a seguir devem ser lidas com atenção e guardadas para referência futura. Mantenha as instruções em segurança!**

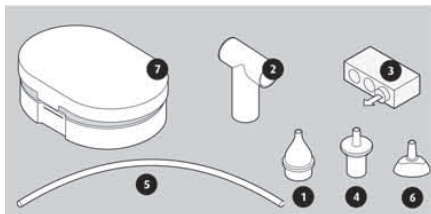

### **Descrição das peças**

- 1- Ponta de silicone macio
- 2- Recipiente coletor
- 3- Filtro higiênico (3 unidades sobressalentes, 1 unidade no aspirador. Podem ser lavados ou esterilizados a vapor)
- 4- Conector da mangueira
- 5- Mangueira
- 6- Bocal
- 7- Caixa de armazenamento higiênica

### **Cuidado!**

Este produto foi concebido para apoiar o seu filho e não é um medicamento. Se seu filho estiver doente, consulte um médico.

### **Instruções de segurança**

- Use o aspirador nasal apenas para o fim a que se destina.
- Verifique se o Aspirador Nasal apresenta danos visíveis antes de cada utilização. Se houver sinais de danos, não use.
- Não use o Aspirador Nasal para sangramentos nasais ou feridas nasais. Não use na boca ou orelhas.
- Não é brinquedo, mantenha fora do alcance das crianças. Não deixe crianças sozinhas com o produto. Apenas para uso por adultos.
- Certifique-se de que todas as peças estejam conectadas firmemente umas às outras antes de usar.
- Se não secar completamente as peças antes da montagem, existe o risco de proliferação de bactérias e fungos.

### **Atenção!**

Nunca sobre o bocal. Não seguir as instruções pode colocar em risco a saúde do seu filho!

### **Instrução de uso**

Se a secreção nasal for muito sólida ou seca, tente amenizar o bloqueio com soluções salinas isotônicas, spray ou gotas. Em caso de dúvida ou incerteza, entre em contato com o seu pediatra.

- 1-** Insira um filtro novo ou limpo (3) na conexão da mangueira (4).
- 2-** Conecte a conexão da mangueira (4) ao recipiente coletor (2) e a ponteira de silicone (1).
- 3-** Coloque a mangueira (5) no suporte da mangueira do recipiente coletor.
- 4-** Coloque o bocal (6) na ponta da mangueira (5).
- 5-** Coloque a ponta de silicone macia firmemente contra a abertura nasal do seu filho.

**Cuidado:**

Coloque o Aspirador Nasal próximo à abertura da narina. Não o empurre para dentro da narina.

**6-** Aspirar no bocal até que a secreção nasal acabe no recipiente coletor.

**7-** Você pode remover a conexão da mangueira e substituir o filtro, se desejar. Os filtros impedem a transferência de bactérias e são laváveis. A parte superior é projetada para evitar danos à membrana mucosa nasal.

**Limpeza e armazenamento**

**1-** Desmonte o Aspirador Nasal em suas partes individuais logo após cada uso.

**2-** Lave as peças do aspirador (inclusive o filtro) imediatamente e com muito cuidado com água morna e detergente neutro.

**3-** Enxágue as partes do aspirador com água.

**4-** Deixe-as secar completamente.

**5-** Quando não for utilizado por longos períodos, recomendamos que limpe novamente o aspirador nasal e esterilize-o antes das próximas utilizações.

**6-** Limpe apenas no cesto superior da máquina de lavar louça ou conforme descrito nos pontos 2-4.

**7-** A desinfecção só é possível no cesto superior do esterilizador a vapor ou fervendo por aprox. 5 minutos.

**8-** Não desinfete no micro-ondas!

**9-** Deixe o aspirador nasal esfriar e secar completamente após a limpeza ou esterilização.

**OBS:** Armazene o produto longe da radiação solar.

**Durabilidade e descarte:**

Recomendamos a substituição a cada 3 anos ou quando o produto apresentar desgastes. O produto pode ser colocado junto com o lixo comum e pode ser reciclado termicamente sem problemas.

**Especificações técnicas**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Idade recomendada</b>   | <b>+ 0 meses</b>   |
| <b>Material/Composição</b> | <b>Caixa de armazenamento: Polipropileno (PP). É livre de PVC e látex.</b> |
|                            | <b>Produto, foi testado para 6 ftalatos e não contém látex e PVC</b>       |
| <b>Dimensões</b>           | <b>46,3 x 8 x 3,5cm</b>  |
| <b>Peso</b>                | <b>Aprox. 21g</b>  |



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 03 (três) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19  
Tel: 51 3245.7100 | [www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)



Origem: D-Oasis, Genecine, China

Rev002\_09/2025\_MKT/PNM