

BALANÇA DIGITAL CORPORAL INCOTERM

BC060

Agradecemos sua confiança na Incoterm! Este manual foi elaborado para garantir que você tenha a melhor experiência com sua nova Balança digital corporal BC060. Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a balança em uso, guarde-o para consultas futuras.

Instruções de operação

- Para uma pesagem precisa, posicione a balança sobre uma superfície firme e nivelada.
- Não coloque a balança sobre tapetes ou pisos irregulares.
- Pressione o botão na parte inferior da balança para alternar entre kg, lb e st:lb.
- A balança liga automaticamente ao detectar um peso de 5 kg ou mais. Após ligar, e permanecer ligada, ela pode medir pesos a partir de 0,2 kg. Pesos inferiores a 5 kg não ligam a balança.
- A balança desliga automaticamente aproximadamente 10 segundos depois que o peso é estabilizado.
- Após ligar a balança, a primeira pesagem pode não ser precisa. Aguarde o desligamento automático e pese novamente.

Recomendações de uso e manutenção

- Mantenha a superfície de vidro seca para evitar escorregões e quedas.
- Permaneça parado (a) durante a pesagem.
- Evite quedas, impactos ou batidas na balança.
- Este produto é um instrumento de precisão, manuseie com cuidado.
- Evite que entre água na balança e mantenha-a em local seco.
- Coloque a balança em superfície nivelada. Não a posicione de forma inclinada.
- Se a balança não ligar, verifique a instalação das pilhas ou se há carga suficiente.
- Se ocorrer erro na pesagem ou se a balança não desligar por um longo período, remova as pilhas por 5 segundos e reinicie.

Especificações técnicas

Faixa de medição	5 a 180 kg / 11 a 396 lb / 0 st: 11 lb a 28 st: 5 lb
Faixa de medição (após acionamento)	0,2 a 180 kg / 0,44 a 396 lb / 0,0314946 a 28,3451 st
Resolução	0,05 kg / 0,1 lb / 0st:11lb
Exatidão	5 a 60kg: ±0,3kg 61 a 120kg: ±0,4kg 121 a 180kg: ±0,5kg
Unidades de medida	kg, lb e st:lb
Faixa de medição (temperatura ambiente)	0 a 50 °C
Material	Vidro temperado de 3,8 mm + revestimento traseiro em HIPS
Desligamento automático	10 segundos
Alimentação	2 pilhas AAA 1,5V
Dimensões	260 x 260 x 20 mm, com ângulo de arco do vidro de 10 graus Visor LCD: 58 x 23 cm com retroiluminação
Peso do produto sem embalagem	0,79kg

Tabela de erros

Erro	Explicação
LO	As pilhas estão fracas e devem ser substituídas.
Err	Significa que houve um erro na pesagem e a balança deve ser reiniciada.
OL	Significa que o peso excede a capacidade máxima da balança.

VALIDADE INDETERMINADA



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



www
incoterm
.com.br

Incoterm
Desde 1973

Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 3245.7100 | www.incoterm.com.br

Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106
atendimento@incoterm.com.br

Origem: China

Rev 006_06/2025_MKT/PNM