


5. Toque imediatamente a ponta da tira de teste na gota de sangue. O sangue será puxado para a tira de teste pela ponta. Não coloque sangue em cima da tira de teste.

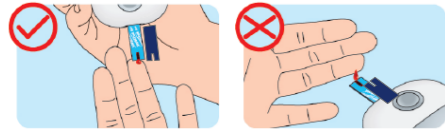

6. O medidor faz uma contagem regressiva de 5 a 1 e seu resultado aparece no visor e será automaticamente armazenado na memória.



-07-

Guia de solução de problemas

Erro no visor	Significado	Resolução
E 1	Sangue ou solução de controle foi aplicado à tira de teste antes que a gota piscando aparecesse no visor.	Descarte a tira de teste e repita o teste com uma nova tira de teste. Espere até ver a gota de sangue piscando no visor antes de fazer o teste.
E 2	O medidor está detectando uma tira de teste usada ou contaminada.	Descarte a tira de teste e repita o teste com uma nova tira de teste. Espere até ver a gota de sangue piscando no visor antes de fazer o teste.
E 3	Tira de teste incorreta.	Descarte a tira de teste e repita o teste com uma nova tira de teste. Certifique-se de que está usando uma tira de teste de Incoterm™ Glico Check.
E 4	Amostra incorreta.	Descarte a tira de teste e repita o teste com uma nova tira de teste. Certifique-se de que apenas sangue capilar humano e a solução de controle sejam usados para o teste.
E 5	Temperatura ambiente fora do intervalo.	Mova-se para uma área que esteja dentro da faixa operacional do medidor. Deixe o medidor se ajustar a essa temperatura por 20 minutos antes de realizar um teste.

-08-

Guia de solução de problemas

E 6 E 7	Possível problema de software ou hardware.	Retire a bateria e reinicie o medidor. Se o problema persistir, entre em contato com o revendedor local.
E 8 E 9		
E 10	Não foi aplicado sangue ou solução de controle suficiente.	Descarte a tira de teste e repita o teste com uma nova tira de teste
24-7 13:00 d m LO	O resultado do teste é inferior a 10 mg/dL (0,6 mmol/L).	Repita o teste usando uma nova tira de teste. Se o resultado ainda piscar LO, entre em contato com seu profissional de saúde o mais rápido possível.
24-7 13:00 d m HI	O resultado do teste está acima de 600 mg/dL (33,3 mmol/L).	Lave e seque bem as mãos e o local do teste. Repita o teste usando uma nova tira de teste. Se o resultado ainda piscar HI, entre em contato com seu profissional de saúde o mais rápido possível.

-09-



** A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida por 02 (dois) anos, a partir da data de compra do produto e mediante apresentação de nota fiscal. A garantia acima se aplica apenas ao consumidor final, que adquiere o produto no varejo. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

VALIDADE INDETERMINADA

Resp. Técnico: Diego Zandona Nardin/ CRQ/RS: 05202514
Número de notificações e registros Anvisa:
Glicosímetro Incoterm Glycemic Control / Glycemic Control BLE - 10343200051
Tiras de teste de glicose Incoterm Glycemic Control - 10343200050
Lanceta para lancetador Incoterm Glycemic Control - 10343209041
Lancetador Incoterm Glycemic Control para lancetas Incoterm - 10343200047
Solução controle para glicosímetro Incoterm Glycemic Control - 10343200048



Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 07.156.352/0001-19
Tel: 51 3245.7100
www.incoterm.com.br

Incoterm
(51) 3245.7141
3245.7106
C-A-C
atendimento@incoterm.com.br

Rev.005_03/2026-MKT/PNM

Fabricado por: VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd, Yuhang Economy Development Zone, Hangzhou, Zhejiang 311100, China

Glycemic Control

Glicosímetro Incoterm

Seu Glicosímetro Incoterm Glycemic Control e a tira de teste.


Foto meramente ilustrativa




GUIA RÁPIDO

Modelo Modelo IVD
VGM02 VGM34



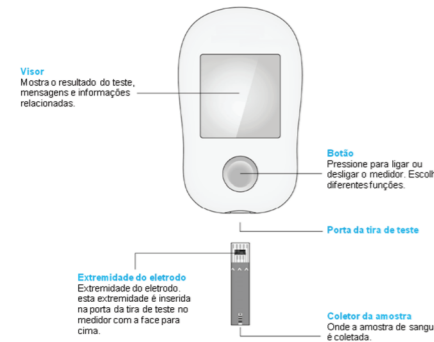

Lancetador Incoterm Glycemic Control



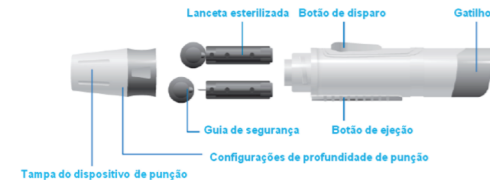


Preparando o dispositivo de punção

Importante:


Antes do teste, limpe o local do teste com um algodão embebido em álcool ou água com sabão. Use água morna para aumentar o fluxo sanguíneo, se necessário. Em seguida, seque bem as mãos e o local do teste.

1. Desparafuse a tampa do lancetador do corpo do dispositivo de punção. Insira uma lanceta estéril no dispositivo de punção.

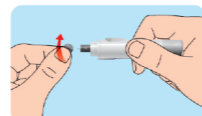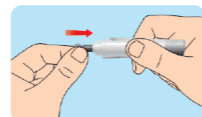
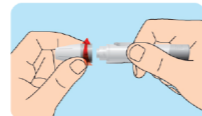


2. Segure a lanceta firmemente no dispositivo de punção e gire a guia de segurança da lanceta até que se solte e, em seguida, puxe a guia de segurança para fora da lanceta.


3. Aparafuse cuidadosamente a tampa no dispositivo de punção.

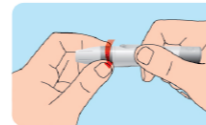

4. Ajuste a profundidade da punção girando a tampa do dispositivo de punção.

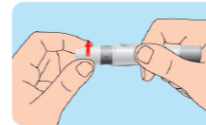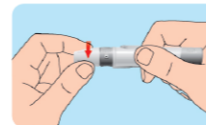

5. Puxe o gatilho para trás para definir o dispositivo de punção.

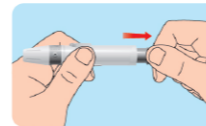

Realizando um teste de glicose no sangue

1. Remova uma tira de teste do frasco de tiras de teste. Feche bem a tampa do frasco imediatamente após ter removido a tira de teste.
2. Insira a tira de teste no glicosímetro na direção das setas. O glicosímetro liga automaticamente.



3. Um símbolo com uma tira de teste com sangue piscando aparecerá, informando que o medidor está pronto para o teste.



4. Pressione o lancetador contra a lateral do dedo a ser lancetado com a tampa apoiada no dedo. Pressione o botão de disparo para furar a ponta do dedo. Descarte a primeira gota de sangue limpando com algodão ou papel higiênico macio limpo, para somente na segunda gota de sangue realizar

