

## BALANÇA DIGITAL CORPORAL INCOTERM

## BC060

Agradecemos sua confiança na Incoterm! Este manual foi elaborado para garantir que você tenha a melhor experiência com sua nova Balança digital corporal BC060. Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a balança em uso, guarde-o para consultas futuras.

## Instruções de operação

- Para uma pesagem precisa, posicione a balança sobre uma superfície firme e nivelada.
- Não coloque a balança sobre tapetes ou pisos irregulares.
- Pressione o botão na parte inferior da balança para alternar entre kg, lb e st:lb.
- A balança liga automaticamente ao detectar um peso de 5 kg ou mais. Após ligar, e permanecer ligada, ela pode medir pesos a partir de 0,2 kg. Pesos inferiores a 5 kg não ligam a balança.
- A balança desliga automaticamente aproximadamente 10 segundos depois que o peso é estabilizado.
- Após ligar a balança, a primeira pesagem pode não ser precisa. Aguarde o desligamento automático e pese novamente.

## Recomendações de uso e manutenção

- Mantenha a superfície de vidro seca para evitar escorregões e quedas.
- Permaneça parado (a) durante a pesagem.
- Evite quedas, impactos ou batidas na balança.
- Este produto é um instrumento de precisão, manuseie com cuidado.
- Evite que entre água na balança e mantenha-a em local seco.
- Coloque a balança em superfície nivelada. Não a posicione de forma inclinada.
- Se a balança não ligar, verifique a instalação das pilhas ou se há carga suficiente.
- Se ocorrer erro na pesagem ou se a balança não desligar por um longo período, remova as pilhas por 5 segundos e reinicie.

## Especificações técnicas

<b>Faixa de medição</b>	5 a 180 kg / 11 a 396 lb / 0 st: 11 lb a 28 st: 5 lb
<b>Faixa de medição (após acionamento)</b>	0,2 a 180 kg / 0,44 a 396 lb / 0,0314946 a 28,3451 st
<b>Resolução</b>	0,05 kg / 0,1 lb / 0st:11lb
<b>Exatidão</b>	5 a 60kg: ±0,3kg 61 a 120kg: ±0,4kg 121 a 180kg: ±0,5kg
<b>Unidades de medida</b>	kg, lb e st:lb
<b>Faixa de medição (temperatura ambiente)</b>	0 a 50 °C
<b>Material</b>	Vidro temperado de 3,8 mm + revestimento traseiro em HIPS
<b>Desligamento automático</b>	10 segundos
<b>Alimentação</b>	2 pilhas AAA 1,5V (não inclusas)
<b>Dimensões</b>	260 x 260 x 20 mm, com ângulo de arco do vidro de 10 graus Visor LCD: 58 x 23 cm com retroiluminação
<b>Peso do produto sem embalagem</b>	0,79kg

## Tabela de erros

Erro	Explicação
<b>LO</b>	As pilhas estão fracas e devem ser substituídas.
<b>Err</b>	Significa que houve um erro na pesagem e a balança deve ser reiniciada.
<b>OL</b>	Significa que o peso excede a capacidade máxima da balança.

VALIDADE INDETERMINADA



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



www  
**incoterm**  
.com.br



**Incoterm**  
Desde 1973

Importado por: Incoterm Soluções em Medição LTDA  
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP: 91751-000 | CNPJ: 87.156.352/0001-19  
Tél.: 51 3245.7100 | www.incoterm.com.br

**Incoterm**  
(51) 3245.7141  
3245.7106  
C·A·C  
atendimento@incoterm.com.br

Origem: China

Rev 007\_06/2026\_MKT/PNM